



Meetinstructies

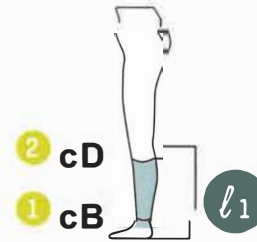

AD KNIEKOUS

- 4 Meets beenlengte van hiel tot kuit (2 vingers onder de knieplooi)
- 1 cB: Meet de omtrek van de enkel (op de enkels)
- 2 cD: Meet de omtrek van de kuit (dikste deel van de kuit)

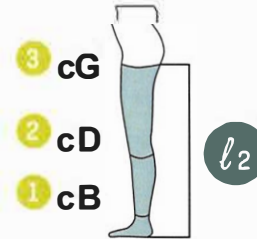

AG DIJKOUS

- 4 Meets beenlengte van hiel tot dij (2 vingers onder bilnaad)
- 1 cB: Meet de omtrek van de enkel (op de enkels)
- 2 cD: Meet de omtrek van de kuit (dikste deel van de kuit)
- 3 cG: Meet de omtrek van de dij (2 vingers onder de bilnaad)

DECO-VISION

Gampelaeredreef 2 bus 001 -B-9800 Deinze -+ 32 (0)9 245 4772
info@deco-vision.be -www.deco-vision.eu